

null

Kennzeichnung: Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Aufbewahrung:

Zutaten:

Alkoholgehalt:

Portionen:

Nährwertanspruch:

Verwendungs
hinweis:

Gebrauchsanweisung: 1. Reinigen und trocknen Sie Ihre Zahnprothese, bevor Sie die Haftcreme auftragen. 2. Tragen Sie die Haftcreme wie im Beipackzettel angegeben auf. Sie könnten einige Versuche benötigen, um die für Ihre Prothese passende Menge zu ermitteln. 3. Prothese einsetzen und kurz fest andrücken. Wenn die Haftcreme herausquillt, haben Sie zu viel aufgetragen. 4. Zum Entfernen der Prothese den Mund mit warmem Wasser ausspülen, leicht an der Prothese wackeln, bis sie sich löst.

Zubereitung &
Anweisung:

Abmessungen: Nettogehalt 47.00 Gramm, Bruttogewicht 64.277 Gramm

Kontakt: Name: Procter & Gamble Austria - Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH; Adresse: Wiedner Gürtel 13, 1100 Wien

Allergene:

Attribute: